




Phonak Naída™ Link CROS

Systém Naída Link CROS umožňuje uživatelům slyšet co nejlépe v tichém i hlučném prostředí tím, že poskytuje povědomí o zvuku a usnadňuje poslech z jejich neimplantované strany. CROS je určen pro jednostranné uživatele AB Naída CI, kteří mají sluch nevyužitelný sluchadlem v neimplantovaném uchu. Naída Link CROS se nosí na kontralaterálním uchu a přenáší mikrofonní vstupní signál bezdrátově přes HIBAN do procesoru CI Naída.

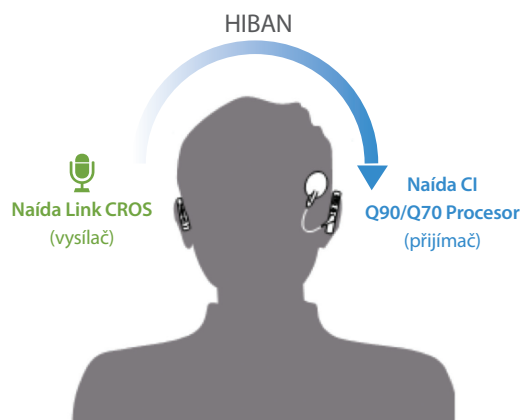

Kompatibilita

Naída Link CROS je kompatibilní s Naída CI Q90 a Q70.

Komponenty Naída Link CROS

1. Phonak CROS demo háček (není pro každodenní použití)
2. Mikrofonní vstup s chráničem mikrofonu
3. Tlačítko pro funkci ztlumení zvuku
4. Prostor pro baterie (funguje jako spínač ZAP/VYP)
Používají se baterie PowerOne 13



Možnosti ušních koncovek



CROS SlimTube

- Doporučena pro každodenní použití
- K dispozici pro levou nebo pravou stranu v různých délkách (velikost 0, 1, 2, 3)
- Koncovky: malé / střední / velké



Zákaznická koncovka CROS

- Vyžaduje otisk pro tvarovku a je možné si ji pořídit u společnosti Phonak

Nastavení Naída Link CROS

- Pro Phonak Naída Link CROS není potřeba žádné nastavování
- V softwaru pro procesor Naída CI SoundWave 3.1 nebo pozdějším se inicializuje použití CROS